



Laparoskopisches Netzverfahren

ProGYNious

Ultraleichter Netzkörper und fester Netzhals

Fakten

- Kombination aus zwei Netzmaterialien: Ultraleichtes, großporiges, weiches, isoelastisches Netz auf Vaginalebene und dichteres, festeres Netz zur Fixierung.
- Unterstützt die bewährten Verfahren Sakrokolpopexie und Sakrozervikopexie.
- Apikale Komponente für Level 1 Suspension zur Verhinderung eines Vaginalprolaps.
- Festeres Netzmaterial des Netzhalses sorgt für eine starke Fixierung auf Höhe des Promontorium ossis sacri.

Benefits

Verschiedene ProGYNious Varianten für unterschiedliche Anforderungen von Patientinnen und Anwender:

- **ProGYNious A** (anterior) wird zwischen Vagina und Blase platziert, um ein Wiederauftreten der Zystozele zu verhindern.
- **ProGYNious P** (posterior) wird zwischen Vagina und Rektum platziert, um ein Wiederauftreten der Rektozele zu verhindern.
- **ProGYNious** ist eine Y-förmige Netzprothese, welches die Merkmale von ProGYNious A und P kombiniert.

Behandlung von Beckenbodenprolaps – ProGYNious

**Laparoskopische
Netzverfahren**

DE 200059-V20220519

ProGYNious ist eine vorgeformte Netzprothese aus zwei Arten von Polypropylen-Netzmaterial. Es kombiniert das Beste aus beiden Materialien, um die vaginale Elastizität zu erhalten und gleichzeitig eine starke Fixierung zu gewährleisten.

1. Netzkörper:

Auf Vaginalebene wird das ultraleichte, großporige und isoelastische HexaPro Netz verwendet, um eine gute Gewebeintegration und Verringerung der Fremdkörperreaktion zu ermöglichen.


2. Netzhals:

Der Netzhals besteht aus einem festeren, dichteren Netzmaterial für eine feste Aufhängung am Ligamentum longitudinale auf Höhe des Promontorium ossis sacri.

Bestellnummer		Produktbeschreibung	Lieferumfang
PFR5731		ProGYNious Ultraleichtes, isoelastisches Polypropylen Netz für den Netzkörper und festeres, dichteres Netzmaterial für den Netzhals für eine starke Fixierung. Für die Sakrokolpopexie und Sakrozervikopexie.	1 Box, steril geliefert: 1 x ProGYNious (anteriores + posteriores Netz kombiniert)
PFR5711		ProGYNious A – Anteriores Netz Ultraleichtes, isoelastisches Polypropylen Netz für den Netzkörper und festeres, dichteres Netzmaterial für den Netzhals für eine starke Fixierung. Für die Sakrokolpopexie und Sakrozervikopexie.	1 Box, steril geliefert: 1 x ProGYNious A (anteriores Netz)
PFR5721		ProGYNious P – Posteriores Netz Ultraleichtes, isoelastisches Polypropylen Netz für den Netzkörper und festeres, dichteres Netzmaterial für den Netzhals für eine starke Fixierung. Für die Sakrokolpopexie und Sakrozervikopexie.	1 Box, steril geliefert: 1 x ProGYNious P (posteriores Netz)

Das Netz im Detail:

- Ultraleichtes Netzmaterial
21 g/m²
- Hexagonale Netzstruktur für Iso-Elastizität
- Weite Porenstruktur ≥ 1,9 mm
- Makroporös
- 93% Porosität
- Extragroße Mikroporen:
100-150 µm
- Monofiles Polypropylen

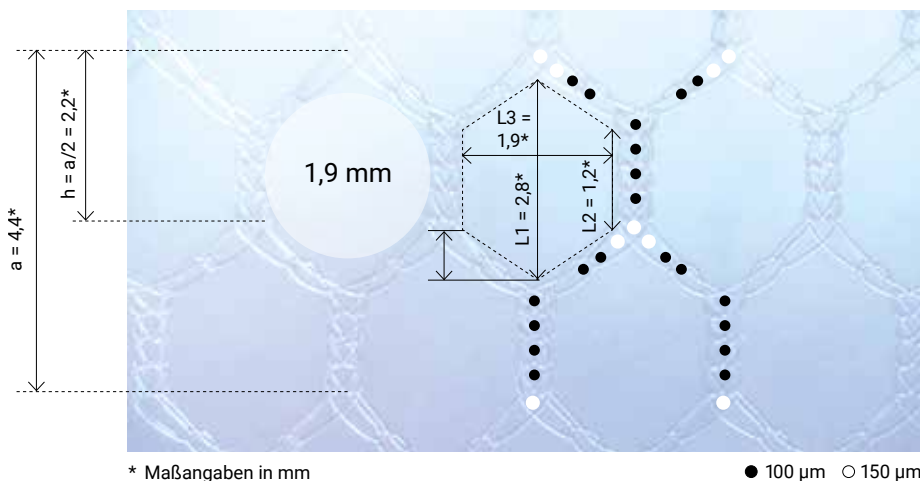

A.M.I. Headquarter:

A.M.I. Agency for Medical
Innovations GmbH
Im Letten 1
6800 Feldkirch
Österreich
T +43 5522 90505 0
F +43 5522 90505 4006
e info@ami.at

A.M.I. in der Schweiz:

FUMEDICA AG
Luzernerstrasse 91
5630 Muri
Schweiz
T +41 56 675 9100
F +41 56 675 9109
e fumedica@fumedica.ch

A.M.I.®

www.ami.at

Die in dieser Broschüre enthaltenen Produkte entsprechen den Anforderungen der Medizinproduktverordnung 93/42/EWG und sind entsprechend mit dem CE-Kennzeichen versehen.

CE 0297 PFR5731, PFR5711, PFR5721