


NEUES DESIGN!

verstärkte Spitze
stabiler Shaft
neue Beschriftung

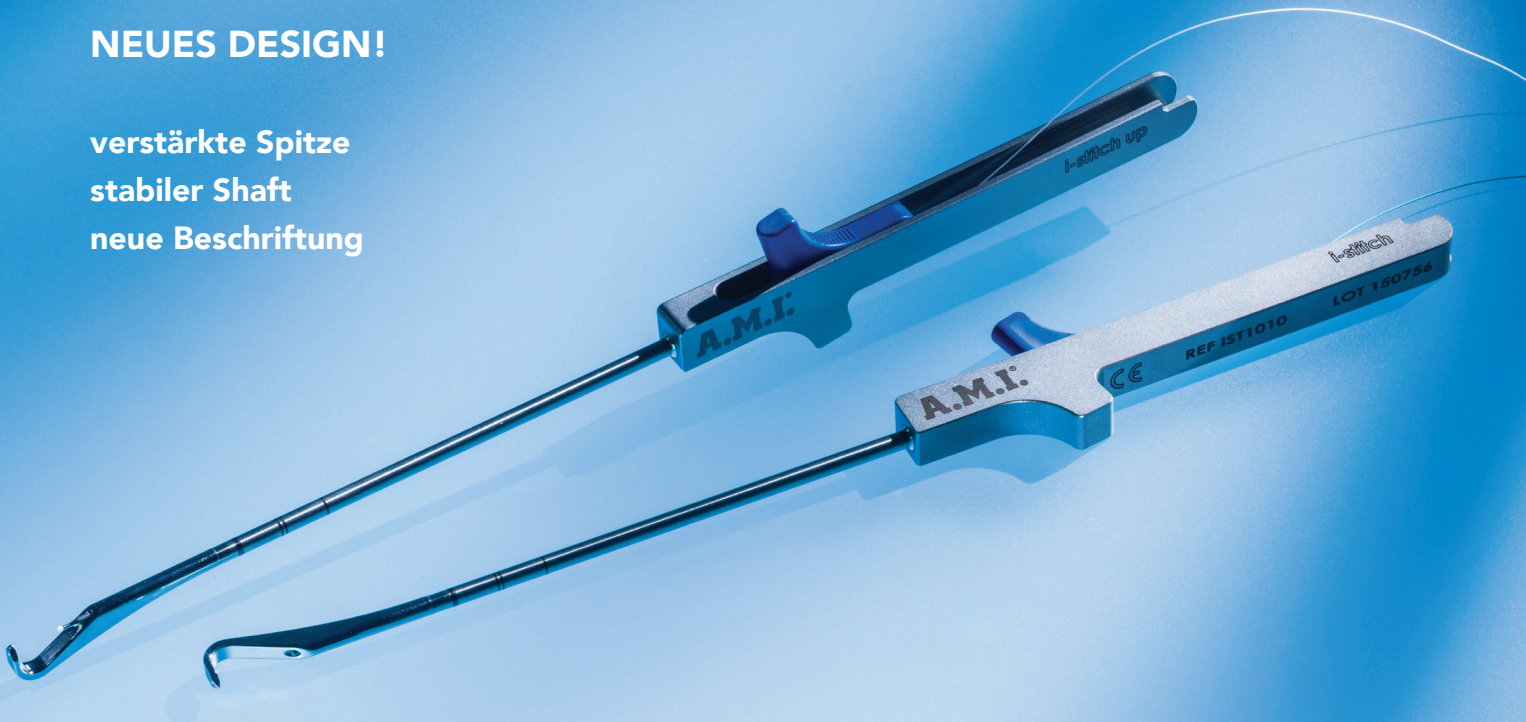

- Sichere und schnelle Platzierung von Haltefäden an schwer zugänglichen Strukturen
- Zur medialen Befestigung am Ligamentum Sacrospinale
 - bei Beckenbodenplastiken – z.B. für das InGYNious
 - für die Vaginaefixatio (nach Amreich-Richter)

Das innovative i-Stitch Nahtinstrument von A.M.I. bietet eine effektive Möglichkeit, Haltefäden an unzugänglichen Gewebestrukturen zu fixieren, beispielsweise am medialen posterioren Ende des sakrospinalen Ligaments. i-Stitch ist so konzipiert, dass es komplett in Einhand-Technik verwendet werden kann.

Komfortable Fixation in 3 einfachen Schritten:



1) Positionierung der Instrumentenspitze



2) Vorschieben der Ladeeinheit



3) Rückziehen der Nadel, Nahtmaterial bleibt in Position

Das wiederverwendbare i-Stitch Instrument wird mit einer Ladeeinheit verwendet. Die Ladeeinheit besteht aus dem Slider, einem Dispenser, einer Hohlnadel und dem speziellen Nahtmaterial.

Die i-Stitch Instrumentenspitze wird in das Gewebe eingedrückt. Die mit dem chirurgischen Faden gefüllte Hohlnadel wird vorgeschoben, bis der elastische Fadenzopf in der Öffnung der Instrumentenspitze einhakt und gehalten wird. Die Hohlnadel wird zurückgezogen und die Instrumentenspitze wird vorsichtig aus dem Gewebe entfernt.

Die Vorteile des i-Stitch:

- sichere Befestigung von chirurgischen Haltefäden
- nicht-schneidende, stumpfe Fadenspitze wird durch das Gewebe geschoben
- minimale Gewebepreparation notwendig
- schnell und sicher auch an schwer zugänglichen Stellen

Bestellnummer	Produkt	Technische Details
IST1010	i-Stitch	Unsteril geliefert, dampfsterilisierbar
	Wiederverwendbares Instrument in Verwendung mit den i-Stitch Loading Units	1 Instrument
IST1040	i-Stitch up	Unsteril geliefert, dampfsterilisierbar
	Wiederverwendbares Instrument in Verwendung mit den i-Stitch Loading Units. Um 180° gedrehte Instrumentenspitze	1 Instrument
	i-Stitch Loading Units	10 Ladeeinheiten / Box, steril geliefert
	Kombination aus Hohlnadel, Slider und speziell vorgeformtem Nahtmaterial zur einmaligen Verwendung mit dem i-Stitch Instrument	Länge des Nahtmaterials: 70 cm
IST1011	i-Stitch Loading Unit PP 0	Polypropylen, Stärke 0, nicht absorbierbar
IST1031	i-Stitch Loading Unit PET 0 W	PET, Stärke 0, nicht absorbierbar, weiß
IST1041	i-Stitch Loading Unit PET 0 G	PET, Stärke 0, nicht absorbierbar, grün
IST1021	i-Stitch Loading Unit PDO 2-0	PDO, Stärke 2-0, absorbierbar
IST1051	i-Stitch Loading Unit PDO 0	PDO, Stärke 0, absorbierbar

International patent filed / pending / granted

A.M.I. in Österreich:

A.M.I. GmbH
Im Letten 1
6800 Feldkirch
Österreich
t +43 5522 90505-0
f +43 5522 90505-4006
e info@ami.at
www.ami.at

A.M.I. in Deutschland:

A.M.I. Deutschland GmbH
Morellstraße 33
86159 Augsburg
Deutschland
t +49 821 450 515 0
f +49 821 450 515 20
e info@ami-deu.de

A.M.I. in der Schweiz:

FUMEDICA AG
Luzernerstrasse 91
5630 Muri
Schweiz
t +41 56 675 9100
f +41 56 675 9109
e fumedica@fumedica.ch



A.M.I.®